

INSTRUÇÕES DE USO

CADEIRA DE BANHO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

O mundo à frente

Kapra
medical



RECOMENDA-SE QUE AS INSTRUÇÕES DE USO SEJAM CUIDADOSAMENTE LIDAS E COMPREENDIDAS ANTES DA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

INDICAÇÕES E FINALIDADE DE USO:

A Cadeira de Banho Lontra fornece suporte ao cuidador e posicionamento ao paciente durante o banho. O assento, suporte de costas e pernas são ajustáveis. A utilização é direcionada para quaisquer usuários, crianças e adultos, desde que compatíveis com as dimensões apresentadas abaixo.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

	Cadeira de banho lontra pequena	Cadeira de banho lontra média	Cadeira de banho lontra grande	Cadeira de banho lontra extra grande
Dimensões(cm):				
Profundidade do assento:	33	33	42	50,8
Largura do assento:	36,8	36,8	36,8	43,2
Altura do encosto:	45,7	63,5	81,2	86,4
Altura do assento:	5 - 17,7	5 - 17,7	5 - 17,7	5 - 17,7
Comprimento total:	92,7	106,6	127	152,4
Altura total:	63,4	81	99	104,1
Largura total:	43,2	43,2	43,2	43,2
Peso(Kg):	4,9	5,4	6,3	8,2
Altura do usuário(cm):	Até 91	81 a 127	117 a 173	127 a 183
Capacidade de peso(Kg):	27	54	72	113

ILUSTRAÇÕES DE CADA MODELO



Cadeira de banho Lontra Pequena



Cadeira de banho Lontra Média



Cadeira de banho Lontra Grande



Cadeira de banho Lontra Extra Grande

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

GUIA GERAL DE CUIDADOS

- Antes de colocar um paciente no equipamento ler com atenção as Instruções de Uso.
- Tenha a certeza de que todos os ajustes foram devidamente compreendidos e efetuados.
- O uso correto do equipamento requer a supervisão constante de um adulto durante toda utilização.
- As alças e suportes devem ser cuidadosamente ajustadas para o conforto e segurança do usuário.
- O equipamento somente deve ser utilizado em um mesmo nível ou em interiores delimitados onde o caminho esteja desobstruído. Não utilize o equipamento perto de degraus, locais com inclinação, passagens estreitas, piscinas ou aqueles que apresentem qualquer risco ao usuário.
- Somente utilizar acessórios fornecidos pelo fabricante.
- Nunca deixe o paciente no equipamento sem a supervisão de um cuidador adulto.

AJUSTES:

ALÇA DE SUPORTE DE CABEÇA: Podem ser ajustadas através da abertura na parte traseira da cadeira e posicionadas na altura desejada. As almofadas do suporte de cabeça (A) podem ser deslizadas ao longo da alça para ajustar a distância mais cômoda.

ALÇA DE CORPO E PERNAS (B): Podem ser ajustadas conforme necessário em toda extensão do assento e encosto.

BASE: Para ajustar a base (C) puxe a barra (D) para fora, gire para cima ou para baixo e empurre para travar novamente.

ANGULAÇÃO DO ASSENTO: Para ajustar o ângulo do assento puxe a barra sob o assento (E), coloque-o na posição desejada e então solte a barra.

ANGULAÇÃO DO ENCOSTO: Para ajustar o ângulo do encosto puxe a barra atrás do encosto, coloque-o na posição desejada e então solte a barra.



MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

A Cadeira de Banho Lontra é entregue/remetida completamente montada.

É necessário somente encaixar a Cadeira na base com rodas:

- 1) Levantar os fechos de ajuste da Base com rodas.
- 2) Colocar a cadeira de banho nos encaixes vermelhos.
- 3) Baixar os fechos de ajuste para firmar a Cadeira na base de rodas.



MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Inspeção a estrutura da cadeira periodicamente verificando se existem rachaduras, avarias, alterações na aparência dos materiais, peças soltas ou frouxas ou faltantes.
- Inspeção a cobertura da cadeira verificando se o tecido está rasgado ou desgastado.
- Caso seja necessário substituir qualquer parte ou peça da cadeira entre em contato com a Assistência Técnica.
- Lave a estrutura da cadeira e a cobertura com água e sabão neutro ou com uma solução de 10% de água sanitária. Não utilize outros produtos de limpeza ou com óleo de pinho. A cobertura e as alças podem ser removidas e lavadas em máquina de lavar roupas. Utilizar água morna para a lavagem. Secar ao ar livre, não utilizar calor para a secagem. Não passar a ferro. Não engomar.

PARTES / PEÇAS / ACESSÓRIOS:

Os integrantes abaixo descritos podem ser fornecidos juntamente com o equipamento ou posteriormente, separados, pois são acessórios da estrutura básica.

Suporte de cabeça



Faixa para o corpo



barra de ajuste



Base com rodas



Faixa para pernas



Cobertura



Base para uso em banheira



Suporte lateral



GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

GARANTIA: O equipamento tem garantia de um ano, após a entrega ao consumidor, contra defeitos de fabricação. A garantia não cobre peças que sofram desgaste pelo uso normal. A garantia não cobre eventuais problemas que sejam decorrentes de mau uso ou uso em desacordo com as Instruções do fabricante.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Consulte a Assistência Técnica acerca de quaisquer dúvidas sobre o funcionamento ou operação do equipamento, bem como sobre reparos que venham a ser necessários.

A Assistência Técnica é a seguinte:
KAPRA COM. IMPORT E SERV. LTDA
Rua Butuí, 144 sala 302
90820-150 – Porto Alegre – RS
Fone/Fax: 0xx (51) 3030 1111

Para receber Assistência Técnica explicita a natureza do problema e o número de série do equipamento.