

Garantia Vitalícia Limitada

Seu produto da marca Drive tem garantia vitalícia de defeitos em materiais e em mão-de- obra para o comprador original.

Este produto foi construído com os padrões mais exigentes e cuidadosamente inspecionado antes do embarque. A garantia limitada vitalícia é uma expressão da nossa confiança nos materiais, na fabricação de nossos produtos e nossa garantia para o consumidor de anos de serviço confiável.

Esta garantia não cobre falha do produto devido ao uso indevido do proprietário, negligência, ou desgaste normal. A garantia não se estende a componentes não-duráveis, tais como acessórios de borracha, rodízios, e alças, que são sujeitos a desgastes normais e precisam de substituição periódica.

Se você tem uma pergunta sobre o seu dispositivo Drive ou esta garantia, por favor, entre em contato com um revendedor autorizado.

Distribuidor exclusivo



Kapra Medical – Rua Butuí, 144/302 – Porto Alegre – RS
Whatsapp: (51) 99511-2191 – Email: kapra@kapra.com.br

www.kapra.com.br

Treinador de Marcha Pacer Trekker Gait Trainer


Item TK 1000, TK 2000 e TK 3000



UE Representante Autorizado
Drive Medical LTD
Ainley's Industrial Estate
Elland, West Yorkshire,
United Kingdom HX5 9JP

www.drivemedical.com

Wenzel *ite* Re/habTM
drive

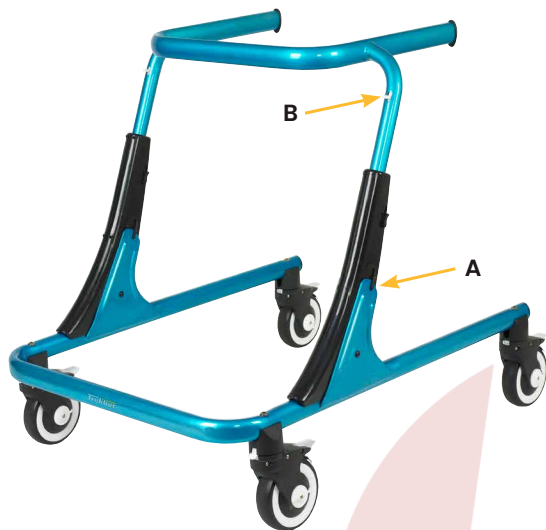

Montagem

O TK 1000 vem completamente montado e não se dobra.


Para os itens TK 2000 e TK 3000:

1. Remova o Treinador de Marcha Pacer – Trekker Gait Trainer da caixa.
2. Desdobre o equipamento, levantando o quadro superior até que as duas travas cliquem no corte em V, representado pela figura A.

Ajustes

Altura

Puxe os gatilhos (B) e deslize para cima na altura desejada. Solte o gatilho e mova a parte superior até que os gatilhos cliquem no lugar.

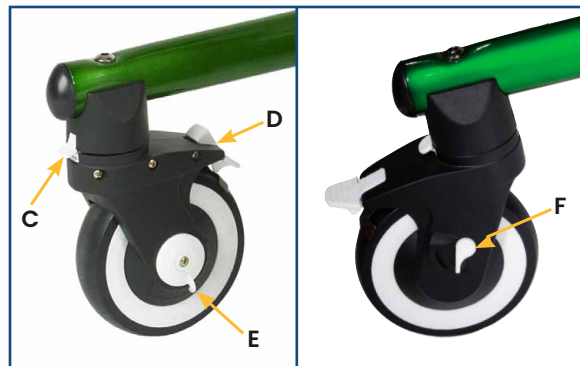

Bloqueio de giro

As rodas podem ser bloqueadas para evitar o giro. Alinhe a alavanca (C), com um dos dois encaixes na roda e empurre a alavanca sobre o encaixe.

Freios

Pressionando na parte inferior do pedal do freio (D) irá bloquear a rotação das rodas. Pressionando na parte superior do pedal de freio vai liberar a rotação das rodas.

Ajustando a resistência


A alavanca (E) oferece a resistência para as rodas. Girando a alavanca para as marcações finas diminui a resistência e para as marcações mais espessas acrescenta resistência.

Trava direcional

A trava direcional pode ser obtida ao ajustar a alavanca (F) para cima. Quando a trava direcional estiver ativa, será possível escutar um clique se mover para frente e quando direcionada para trás a roda se trava.

Acessórios

A maioria dos acessórios são montados com o suporte de montagem universal. Para instalar o suporte de montagem, solte a rosca (G) da braçadeira. Levante a pinça, coloque sobre a base superior e aperte a rosca (G). O suporte de montagem pode ser colocado em qualquer lugar da base superior e vai depender de habilidades do usuário. O suporte pode ser montado em ambas as direções, tanto para o interior ou para a parte exterior da base superior.

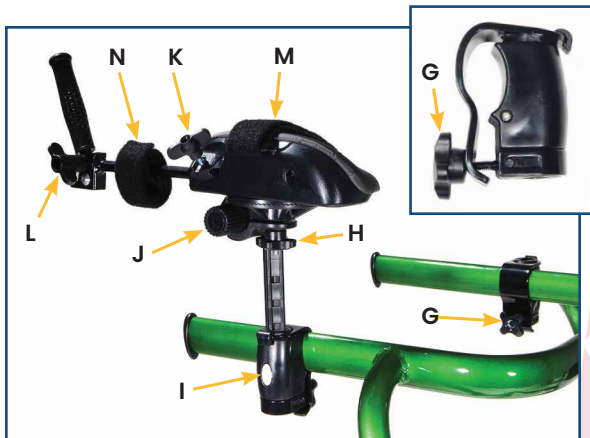

Suporte de braços

Item TK 1035S e TK 1035L

Instale o suporte de montagem no local apropriado. Insira o suporte de braços no suporte de montagem pressionando o botão branco (I) e ajuste o suporte de braços na posição desejada.

Largura – O suporte de braço pode ser colocado mais perto ou mais longe do usuário seguindo as instruções abaixo:

- Afrouxando a rosca (H) e deslizando o suporte para fora ou para dentro.
- Coloque o suporte com a braçadeira virada para o lado de fora ou para o interior da base.
- Posicione a plataforma (J) voltada para o exterior ou para o interior da base.

Rotação – Solte a rosca (H) para girar para cima ou para baixo e para dentro ou para fora. O suporte pode girar 360 ° graus.


Profundidade – Solte a rosca (H) e ajuste a profundidade movendo a plataforma (J).

- Afrouxando a borboleta (K) permite que o suporte de mãos se estenda ou se contraia.
- Afrouxando a borboleta (L) permite ajuste do ângulo.
- Alça (M) e alça (N) assegura o braço.

Suporte de mãos

Item TK1045


Instale os suportes de montagem em local apropriado na base superior. Eles podem ser montados com a braçadeira virada para o lado de fora ou no interior. Para ajustar a altura, pressione o botão (I) e deslize para a posição desejada. Libere o botão (I) e deslize até que ele se encaixe no lugar. O suporte pode girar em quatro direções.

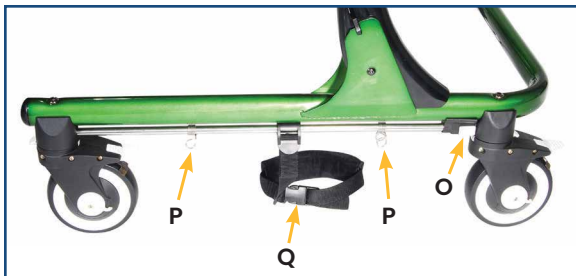

Suporte de tornozelo

Itens TK1060S, TK1060M e TK1060L

Instale o suporte de tornozelo introduzindo a ponta da haste na lateral das rodas, em seguida, puxe gatilho branco (O) e insira na lateral oposta. Para ajustar o passo do usuário, pressione e deslize os grampos de mola (P) para o comprimento adequado. Para ajustar o tamanho das tiras no tornozelo use o ajustador (Q) do suporte de tornozelo.

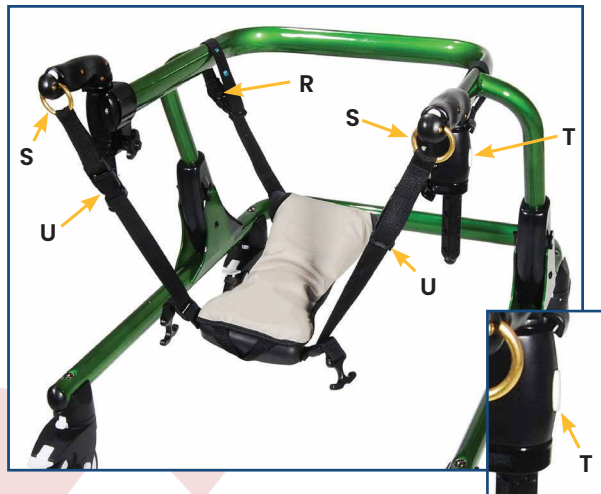

Posicionador de quadril e almofada

Itens TK1070S e TK1070

Instalar o suporte de montagem e o suporte de mãos na parte de trás da base superior. Anexe a frente do posicionador de quadril à frente da base superior, usando o encaixe (R). Anexe a parte traseira do posicionador de quadril na parte traseira da base superior com os anéis de fixação (S).

Ajustes do posicionador de quadril

Altura - Na parte traseira do posicionador quadril - pressione o botão (T) e ajuste o suporte para a posição desejada, libere o botão (T) e certifique que está corretamente encaixado.

Altura - posicionador de quadril - Altera a altura, ajustando o comprimento da frente usando as duas cintas.

Profundidade - Reposicione o suporte de montagem na base superior.

O posicionador de quadril pode ser usado com ou sem a almofada.

Para fixar a almofada, empurre as tiras traseiras (U) do posicionador quadril através dos furos na parte de trás e puxe ao lugar desejável. Encaixe as abas laterais e frontais do posicionador de quadril.





Suporte de Peito

Item TK1080S, TK1080M e TK1080L

Instale o suporte de montagem e posicione diretamente atrás da haste vertical. Afrouxe a rosca (V) sobre o suporte e insira o suporte de peito na posição desejada. Aperte a rosca. Ajustes do suporte de peito:

O suporte de peito tem duas alças ajustáveis e fivelas de cada lado. A parte dianteira do suporte de peito também tem uma alça de restrição para manter as almofadas juntas. Cada alça é ajustável independentemente para ajustar o tamanho, forma e ângulo do apoio de tronco.

Altura - Pressione o botão (I) e ajuste para a posição desejada. Solte o botão e ajuste o suporte de peito até que se encaixe no lugar.

Largura - o suporte de peito pode ser colocado mais próximo ou mais distante do usuário:

- Afrouxando a rosca (V) e fazendo deslizar o suporte de peito para fora ou para dentro.
- Coloque o suporte de montagem com a braçadeira virada para o lado de fora ou para o interior do andador.

Profundidade - Reposicionar o suporte de montagem na base superior.

Rotação - Pressione os botões (V) e ajuste a inclinação do suporte para a posição desejada. Aperte a rosca.



Suporte de Coxas

Item TK1090S e TK1090L

Instale o suporte de coxas na base superior do andador. É aconselhável montá-los atrás do apoio de peito.

Ajustes:


Altura - Afrouxe a rosca (W) e deslize a alça para coxa (X) para cima ou para baixo para a posição desejada. Aperte a rosca.

Largura - A alça para as coxas pode ser colocada mais perto ou mais longe do usuário:

- Rosca superior (Y), ajuste a alça para coxas para dentro ou para fora e aperte a rosca.
- Coloque o suporte de montagem com a braçadeira de frente para fora ou dentro da base superior.

Profundidade - Reposicionar o suporte de montagem na base superior.

Rotação - Afrouxe a rosca (W), gire a alça para as coxas e aperte a rosca.

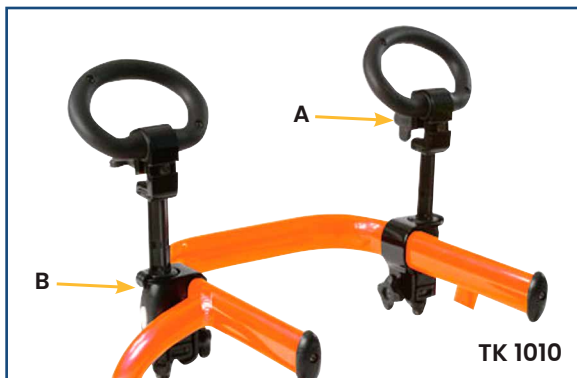

Suporte de mão arredondado

Item TK1010

Instale o suporte de montagem no local apropriado da estrutura superior do andador. (Ver as instruções na página 3) Eles devem ser instalados à frente da haste vertical. Isso proporciona estabilidade e amplo espaço para outros acessórios.

Insira o suporte de mão arredondado no suporte de montagem com o botão (A) de costas para usuário.



Barra Guia de direção

Item TK1020

Afrouxe a rosca (C) para abrir a braçadeira. Instale a barra guia de direção no centro da base superior à frente da estrutura do andador. Aperte a rosca para prender a barra.

Ajustes:

Afrouxe a rosca (C) e rode a barra guia de direção até que ela esteja por trás do usuário para empurrar ou na frente para puxar. Aperte a rosca para fixar na posição desejada.

Limpeza

Limpe periodicamente o suporte de peito, posicionador de quadril, suporte de braço, e outros acessórios que entram em contato com o usuário com um pano úmido e um desinfetante suave.

Lave as rodas com água após o uso ao ar livre. Evite a lama e areia. Não use lubrificantes à base de petróleo ou à base de solvente, mas, quando necessário lubrificar com spray de silicone ou grafite.

Manutenção

Duas vezes por ano inspecionar as alças e almofadas substituindo-as quando necessário. Inspeção periodicamente quebras, peças soltas, peças em falta, rachaduras e/ou avarias. Retire o produto do uso, quando o produto apresentar riscos tornando-se sua operação insegura.