
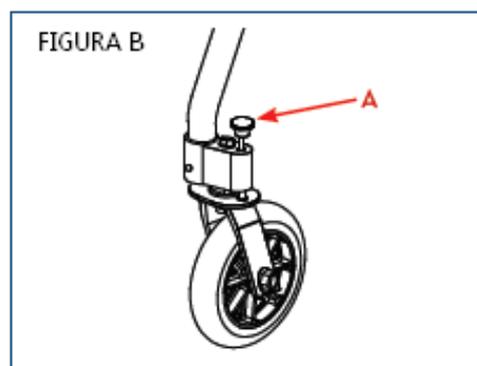


MONTAGEM E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Para modelos:

- Andador Nimbo Posterior mini
- Andador Nimbo Posterior pequeno
- Andador Nimbo Posterior médio
- Andador Nimbo Posterior grande
- Andador Nimbo Posterior XL

1. Remover o equipamento da caixa de remessa.
2. Para desdobrar a andador Nimbo puxar a parte traseira e a parte dianteira em direções opostas, até ouvir o click de encaixe.
3. Para instalar as hastes verticais (com rodas), colocar a haste superior no encaixe de número correspondente indicado na base. Pressionar a haste para dentro da base e deslizar para a posição desejada. Certificar-se de que os pinos estão na mesma altura em ambos os lados e travados (para fora do orifício).
4. Para reajustar a altura do andador Nimbo, pressionar os pinos em cada haste, Deslizando-os após para a posição desejada.
5. Eleve e posicione o pino (A) para ajustar as rodas no modo giratório ou no modo fixo.

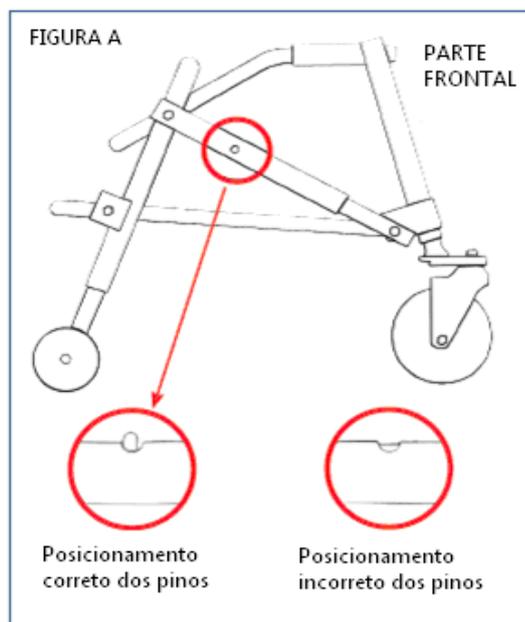

6. Para dobrar o andador Nimbo, posicione-se na frente da parte aberta, pressione os pinos das hastes horizontais e empurre a parte traseira em direção à parte frontal (melhor deitar o aparelho para trás).

7. Para desativar o modo unidirecional das rodas traseiras, levante o pino de alumínio, fixando-o na posição vertical, conforme a Figura C.



PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

GUIA GERAL DE CUIDADOS

- Antes de colocar um paciente no equipamento ler com atenção as Instruções de Uso. Tenha a certeza de que todas as instruções de montagem e de ajustes dos suportes e das tiras de fixação foram devidamente compreendidas.

- O uso correto do equipamento requer a anterior aprovação de um fisioterapeuta ou médico. É recomendada supervisão constante durante a utilização.

- Os suportes e tiras de fixação são disponibilizados para segurança do usuário. Sua utilização deve ser especialmente supervisionada e serem cuidadosamente ajustados para o conforto e segurança do usuário. Os suportes e tiras não devem ser retirados do equipamento.

- O equipamento deve ser utilizado somente em um mesmo nível ou em interiores delimitados, onde o caminho esteja desobstruído. Não utilize o equipamento perto de degraus, inclinações, estradas, passagens estreitas, piscinas ou locais de qualquer modo perigosos.

- Somente utilizar acessórios fornecidos pelo fabricante.

- Nunca deixe o paciente no equipamento sem supervisão de um cuidador adulto.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Limpe periodicamente o suporte de peito, posicionador de quadril, suporte de braço e outros acessórios que entrem em contato com o usuário com um pano úmido e sabão neutro.

- Lave as rodas com água após o uso ao ar livre. Evite a lama e areia. Não use lubrificantes à base de petróleo ou à base de solvente, mas, quando necessário, lubrifique com spray de silicone ou grafite, nunca com o equipamento em uso.

- Inspecionar as alças e almofadas, substituindo-as quando necessário.

- Inspecionar eventual existência de rachaduras, peças soltas, peças em falta ou com mau funcionamento e/ou quaisquer avarias.

- Retire o equipamento do uso, imediatamente, quando apresentar qualquer tipo de risco que torne sua operação insegura.

- Aperte as porcas e parafusos, se necessário. Se for necessária assistência técnica ou peças de reposição, entre em contato com a Assistência Técnica.

PARTES / PEÇAS / ACESSÓRIOS:

Os integrantes abaixo descritos são acessórios da estrutura básica e podem ser fornecidos juntamente com o equipamento ou posteriormente, se necessários ou para reposição.

Estabilizador Pélvico



Ajustável em largura, com almofadas laterais e um cinto de suporte. Recomendado para usuários que têm postura assimétrica quando em pé ou andando e, portanto, que não podem permanecer no centro do equipamento.

Posicionador de Quadril Flexível

Ajustável em largura, com almofadas laterais e um cinto de suporte. Recomendado para usuários que têm postura assimétrica quando em pé ou andando e, portanto, que não podem permanecer no centro do equipamento.



Suporte de Braço



Construído de alumínio leve resistente, altura e profundidade ajustáveis, punhos extensíveis para a frente ou para trás, ajustáveis em supinação e pronação, apoio de braço com borda flexível, inclui cintas de velcro para fixação do braço, escolha de posições de montagem dentro ou fora da base para ajuste lateral, espaçadores incluídos.

Protetor de Impacto

Protetores universais instalados sobre rodas dianteiras, absorvem choques em paredes. Circunferência de 15 cm", espessura é de 1,9 cm.



Rodas de 9' - não giratória e Bolsa de Acessórios



Controle de Resistência

Fornecem resistência variável em uma ou em ambas rodas traseiras. Permitem o controle de velocidade e alinha padrões de marcha assimétricas.



GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

GARANTIA

O equipamento tem garantia de um ano, após a entrega ao consumidor, contra defeitos de fabricação. A garantia não cobre peças que sofram desgaste. A garantia não cobre eventuais problemas do equipamento que sejam decorrentes de mau uso ou uso em desacordo com as Instruções do fabricante.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte a Assistência Técnica sobre quaisquer dúvidas acerca do funcionamento ou operação do equipamento, bem como a respeito de reparos que venham a ser necessários.

A Assistência Técnica é a seguinte:

KAPRA COM. IMPORT E SERV. LTDA

Rua Butuí, 144 conj. 302

90820-150 – Porto Alegre – RS

Fone/Fax: 0xx (51) 3241 2001

Para receber Assistência Técnica explicita a natureza do problema e o número de série do equipamento.